

TR 4200 Atlas Junior

Duschvagn för tunga brukare

Hygiene Equipment
Designed for People

Atlas Junior - Duschvagn för dina speciella behov



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

TR reserves the right to make design changes and/or improvements without notice.



Sidogrindarna kan fällas vid överflyttning och fällas upp för säker transport



Liggytan kan vinklas för bra avrinning alternativt Trendelenburgläge



Duschvagnen Atlas är utvecklad för att ge utrymme och bärighet för Era mest krävande vårdtagare. Atlas kan användas vid duschning, som skötvagn eller behandlingsvagn. Möjligheterna är många.

Vårdtagaren kan på ett säkert sätt flyttas från säng till Atlas och åter.

Frigången på vagnens underrede tillåter överföring från de flesta mobila lyftar. Båda sidogrindarna kan fällas helt vilket underlättar överföringen.

Via handkontrollen kan liggytan höjas och sänkas tack vare de två kraftiga ställdonen. Med handkontrollen styrs även vinklingen av liggytan (max 4 grader i båda riktningarna) för att ge bra avrinning vid duschning alternativt Trendelenburgläge. En ljudsignal indikerar när liggytan är i plant läge.

Sidogrindarna kan ställas i tre olika lägen (upprest, horisontellt alternativt hängande) för att ge god säkerhet och underlätta överflyttningen.

Liggytan har motkörningsskydd i varje hörn. Alla fyra hjulen är låsbara via fotreglage (centrallåsning). Samma reglage reglerar även rakstyrningsmekanismen.

TR 4200 levereras med batteriladdare, avloppsslang och huvudkudde. Två olika kilkuddar finns som tillbehör.



TR EQUIPMENT



TR 4200 Atlas Junior

Duschvagn för tunga brukare

Hygiene Equipment
Designed for People



Funktioner

Via handkontrollen styrs de två kraftfulla ställdonen som tyst och enkelt höjer och sänker liggplattan. Handkontrollen styr även tippningen av liggplattan i båda riktningarna. Vid behov kan tippningen användas som "Trendelenburg" läge.

Tack vare liggplattans höjdställningsalternativ får vårdaren alltid en bekväm arbetshöjd.

En summerton ljuder när liggplattan är i horisontellt läge.

Vid transport genom trånga passager fälls sido-grindarna enkelt inåt och reducerar liggplattans bredd.

Liggplattan har fenderhjul i alla fyra hörn för att skydda dörrar och vägpassager. Som standard levereras liggplattan med en flamsäker madrass, avlopp med töjbar avloppsslang samt kudde.

TR 4200 är tillverkad av varaktigt och tåligt material såsom pulverlackerat och elförzinkat stål som underlättar enkel rengöring och effektivt underhåll. Madrassen är löstagbar.



Bekvämt fotreglage för rakstyrning, transportläge och bromsning av hjul.


Specifikationer

Längd	2150 mm
Bredd	740 mm
Höjd	535-835 mm
Max belastning	270 kg
Chassi - Material	Pulverlackad rostfritt stål
Hjul	Broms på samtliga hjul samt riktningsspätt via central fotkontroll
Hand kontroll	För höjjustering samt tiltning
Madrass, kudde	Flamsäkert material
Batteri	Laddningsbart, 24 V

Tillbehör:

Kilkudde (580*500*140)
Kilkudde (580*600*140) 15°
Kilkudde (580*600*280) 30°

Mått (mm)

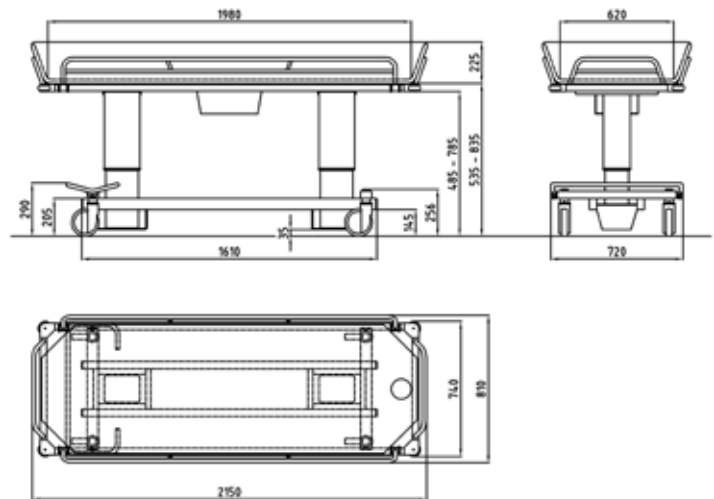

Distributör:

Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Group Subsidiaries

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT