



TR 3000 çok amaçlı hasta yıkama sedyesi, hastaların yataklarından alınarak, sedye içerisinde yıkanmasında, pansuman ve debridmanın yapılmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmasının yanı sıra geniş yüzey alanı ve sağlam yapısı sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. TR 3000 sayesinde hasta yatağından güvenle alınıp istenilen noktaya nakledilebilir ve hasta aynı sedye içerisinde yıkanabilir. TR 3000, yanık hastalarının ilk müdahalelerinde ve servislerde rutin debridman ve pansumanlarının yapılabilmesi için tasarlanmıştır.

TR 3000, tek kolonlu kaldırma sistemi ve ayak kumandalı yükseklik ayarı sayesinde sessiz ve sarsıntısız bir şekilde yükselip alçalabilir. Trendelenburg/ eğim kolu, cihaza her iki yönde eğim verebilmektedir. Böylece kullanıcı, hasta üzerinde çalışmak için en uygun mesafeyi ve eğimi kendisine göre ayarlamış olur. Eğim kontrolü sayesinde yıkama esnasında daha iyi drenaj sağlanır ve acil durumlarda cihaz kolayca trendelenburg pozisyonuna getirilebilir.

Sedyenin yüksekliği elektrik motoru sayesinde kolayca ayarlanır. Yüksek kapasiteli bataryaları sayesinde uzun saatler çalışabilir. Bataryaları aşırı şarja karşı korumalıdır.

Yan koruma demirleri hastaların sedye üzerinde güvenle yatmalarını sağlar. Koruma demirleri, transfer esnasında yanlara açılır, hasta sedye üzerine alındıktan sonra tekrar yukarı konuma alınarak kilitlenir. Kenar koruyucuların yüksekliği şilteyle birlikte 225 mm'dir. Yan koruma demirleri dar yerlerden geçerken içe doğru itirilerek alan kazanılır.

Cihaz üzerinde ikisi frenli ve ikisi düz çizgi ilerleme mekanizmasına sahip dört adet tekerlek vardır.

Atık su, minder üzerindeki su akış kanallarından sedyenin her iki ucunda bulunan giderlere yönlendirilerek buradan drenaj hortumuyla tahliye edilir.

TR 3000 kaplanmış paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sedye şiltesi kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir.



TR 2810 HASTA YIKAMA VE DEZENFEKSİYON PANELİ

TR 2810, su akış ve ısı ayarı elle kontrol edilen, entegre termostatik karıştırıcıya sahip duş ve dezenfeksiyon panelidir. TR 2810 üzerindeki termostatik karıştırıcı sayesinde su ısısı kolayca ayarlanır ve ayarlanan ısı korunur.. Cihazın bir yanında hasta duş başlığı diğer yanında dezenfeksiyon başlığı bulunmaktadır. Tetik kontrollü duş ve dezenfektan başlığı kullanıcıya kolaylık sağlar. Dezenfeksiyon sistemi sadece soğuk su ile çalışarak buharlaşmadan kaynaklanabilecek zehirlenmeleri engeller. Panelin orta kısmında kısmen gizli çıkarılabilir 1 lt. kapasiteli dezenfeksiyon haznesi bulunmaktadır. Hazneye konulan dezenfektan madde, ayarlanabilen enjektörlü karıştırıcı sayesinde istenilen oranda suyla karıştırılır. Duş başlığı üzerindeki Dijital termometre su sıcaklığının takip edilmesini sağlar.



TR 3000 Hasta Yıkama Sedyesi, TR 2810 Duş ve Dezenfektan Paneli ile birleştiğinde tam bir hasta yıkama ve debridman sistemini oluşturur.

TR 3000 Teknik Özellikler

Maksimum yük kapasitesi:

150 kg

Kaldırma yüksekliği aralığı:

595- 895mm

Aşırı yük güvenliği:

Devre kesici sistemli

Şarj edilebilir batarya:

(12 Vx 2) 24V, batarya şarj aleti

Şase:

Tamamen paslanmaz ve kaplanmış çelik

Tekerlekler:

Fren ve düz çizgi mekanizmalı

Ayak kumanda kontrolü:

Alçalma- Yükselme


Sedye şiltesi:

Polyester köpük ile doldurulmuş yangına ve dezenfektanlara dayanıklı PVC kaplı kumaş.

Gri/ Mavi/ Sarı renk seçenekleri.

Cihaz boyutu:

750 mm (en) x 1900 mm (boy)

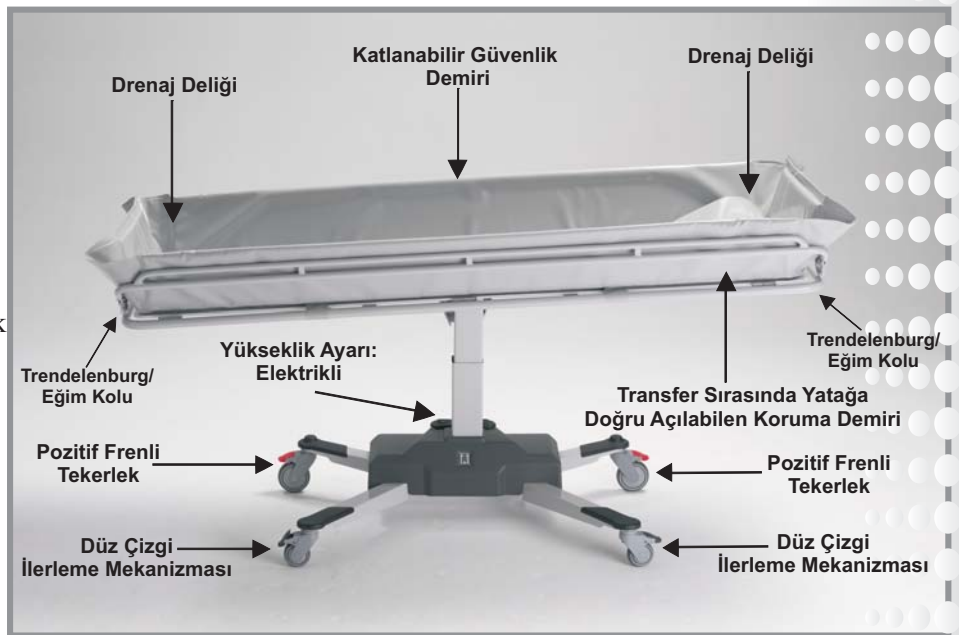

Yanık Tedavisi ve Hijyen Çözümleri İçin Tasarım...