



# TR 1000

## Duschstol

Hygiene Equipment  
Designed for People


### Quick guide för Duschstolen



Position	Beskrivning
1	Lyftpelare
2	Stolsits
3	Ryggstöd
4	Huvud/nackstöd
5	Fällbara armstöd
6	Benstöd
7	Bäcken inkl. lock (tillbehör)
8	Handkontroll, upp/ner och lutning
9	Löstagbart batteripaket
10	Främre fällbara armstöd (fabriksmonterade)
11	Tvillingjul med broms
12	Handtag
13	Fotstöd, fällbart och höjdanpassat (tillbehör)
14	Nödstopp
15	Säkerhetsbälte
16	Underredsbas
17	Spänne av/på för batteripaket

Max brukarvikt: 200 kg



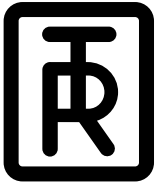

# TR 1000

## Duschstol

Hygiene Equipment  
Designed for People

### Quick guide för Duschstolen



- Endast kvalificerad personal, som förstår alla handhavanden och säkerhetsdetaljer får använda och bruka utrustningen/produkten.
- Säkerhetsbältet skall alltid vara fastspänt runt vårdtagaren.
- Lämna aldrig vårdtagaren utan uppsyn.
- Tvillinghjulen skall alltid låsas innan överföring av vårdtagaren till och från duschstolen.
- Vårdtagaren skall sitta bekvämt och säkert i stolen med nerfällda armstöd.
- Försäkra er att alla produktdetaljer som kommer i kontakt med vårdtagaren är felfria och utan skarpa kanter.
- Kontrollera att stolen kan förflyttas, höjas/sänkas och lutas säkert för att undvika klämrisk för vårdtagaren.
- Kör stolen försiktigt vid transport av vårdtagaren genom trånga korridorer och över ojämna golvytor.
- TRE´s batteriladdare är den enda godkända för laddning.
- Använd inte batteriladdare i våta eller fuktiga miljöer - risk för elstötar.
- Daglig laddning av batteripaket rekommenderas eller under tiden som stolen inte används. Batteripaketet kan inte överladdas.
- Kontrollera att hjulbromsning är felfri.
- Kontrollera att alla produktdetaljer är på plats och felfria - gäller även infästningar och skruvförband.
- Dynor skall vara väl underhållna och på plats.
- Stolen skall inspekteras/kontrolleras visuellt gällande slitage. Stolen skall inte användas om slitage eller brister uppdagas. Service påkallas.

**Varning:** Använd aldrig stolen på något sätt eller vis som som kan påverka vårdtagarens säkerhet eller vad som är detaljerat i bruksanvisningen. Utrustningen får inte användas av någon brukare som inte läst och förstått användningsförfarandet beskrivet i bruksanvisningen.

**För ytterligare information, studera bruksanvisningen.**

#### Head office

TR Equipment AB, Sweden  
Phone: +46 140 38 50 60  
info@treqipment.se  
www.treqipment.com

#### Group Subsidiaries

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900  
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386  
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT