
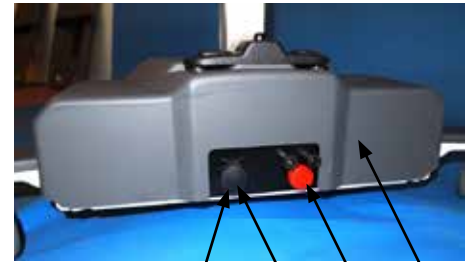


TR 9650

Sitzlifter

Hygiene Equipment
Designed for People

Quick guide für TR 9650 mit Stuhl

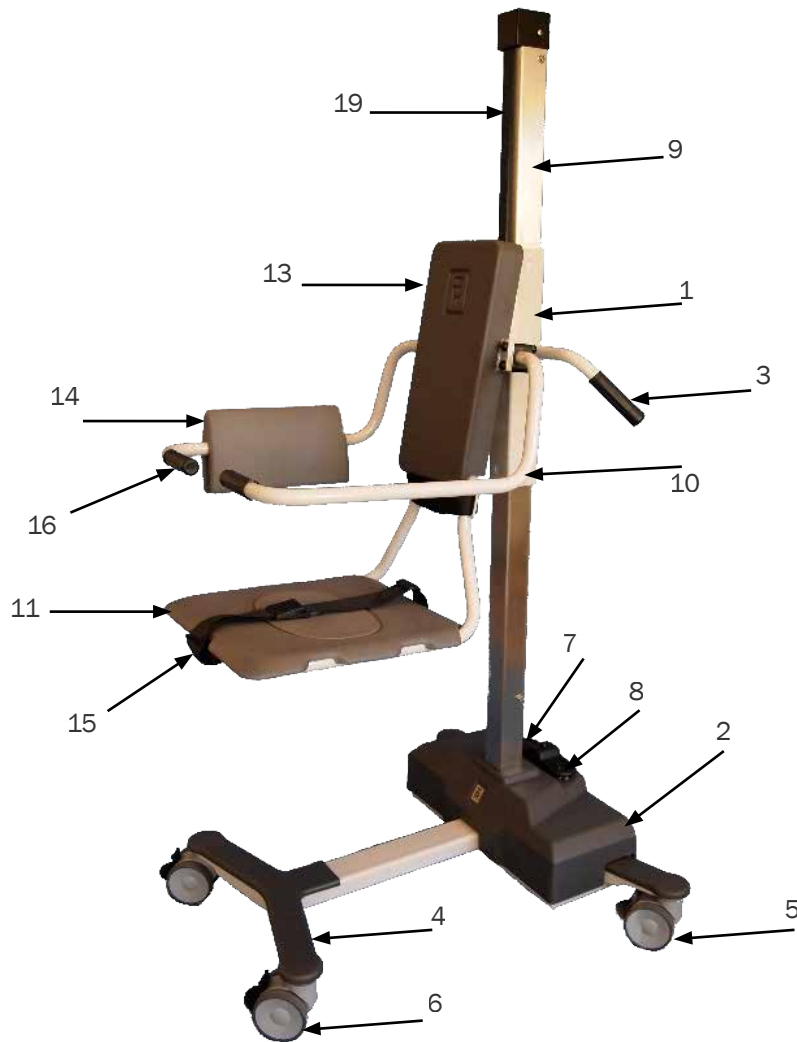

geöffneter Ladendeckel:



Maximale Traglast: 150 kg (330 lbs)

Position	Beschreibung
1	Sicherheitsschlitten
2	Fahrgestell
3	Schiebegriffe
4	Chassis Bein
5	Räder mit Feststellbremse, 100mm Twin
6	Räder mit Geradeauslaufsperr, 100mm Twin
7	Fußtaster zum Anheben
8	Fußtaster zum Absenken

9	Hubmast aus rostfreiem Edelstahl
10	Handgriff/Rückenstützarm, abklappbar
11	Pflegesitz
13	Abnehmbare Abdeckung
14	Rückenstütze
15	Sicherheitsgurte
16	Transport - Handgriffe
19	Antriebsriemen
20	Tiefentladeschutz: Signalton
21	Batterie - Ladeanschluss
22	Not - Stoppschalter

Head office


TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Group Subsidiaries

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT

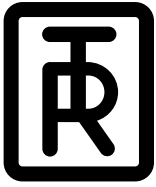

TR 9650

Sitzlifter

Hygiene Equipment
Designed for People



- Nur geschultes Personal, welches folgende Anleitung zur Handhabung und Wartung sorgfältig gelesen und verstanden hat, darf den Lifter bedienen.
- Prüfen Sie, ob die Bremsvorrichtungen und Laufrollen, sowie Geradauslaufsperrern sicher funktionieren, frei von Schäden und korrekt befestigt sind.
- Der Patient muss mit den Sicherheitsgurten während des ganzen Vorgangs auf dem Sitz gesichert bleiben.
- Überprüfen Sie die sichere Funktion und Zustand des Lifters, ob sämtliche Schraubverbindungen richtig befestigt sind.
- Lassen Sie niemals einen Patienten unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie die Sicherheitsgurte und Sitz auf Funktion und Verschleiss.
- Die Radbremzen müssen blockiert sein, bevor Sie den Patienten auf den Sitz befördern.
- Der Antriebsriemen ist optisch auf Anzeichen von Verschleiss zu prüfen. Bei Schäden darf der Lifter nicht weiter benutzt werden. Sofortiger Kundendienst ist notwendig.
- Setzen Sie den Patienten bequem auf den Sitz und sichern Sie ihn mit den Gurten.
- Achtung: Die Ausrüstung sollte nicht auf irgend welche Weise benutzt werden, die von den in dieser Anleitung detailliert beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen abweicht. Nur geschultes Personal, das die Bedienungsanleitung zur Handhabung und Wartung sorgfältig gelesen und verstanden hat, darf die Ausrüstung bedienen.
- Um jegliche Klemmrissen zu vermeiden, müssen die Hände des Patienten den Sicherheitshandgriff umfassen, alternativ kann der Patient die Hände über der Brust gekreuzt halten.
- Autostop: Sollte der Sitz beim Absenken auf ein Gegenstand aufsetzen, stoppt der Motor automatisch. Sollte der Antriebsriemen die Spannung verlieren, wird der Sitz an der Stützsäule automatisch blockiert. Die Blockierung, durch Betätigung des Tasters für aufwärts lösen. Sollte der Antriebsriemen komplett ausfallen, wird der Lifter an der Säule ebenfalls automatisch blockiert, bitte Kontakt mit TR-Kundendienst aufnehmen und technischer Hilfe anfordern. Für mehr Informationen bitte die Bedienungseinleitung lesen.
- Bedienen Sie den Lifter sorgfältig, wenn Sie den Patienten durch enge Korridore und über unebene Oberflächen transportieren.
- Ein TR Batterieladegerät ist die einzig zulässige Methode, den TR Lifter aufzuladen.
- Benutzen Sie das Batterieladegerät niemals in nasser oder feuchter Umgebung, es besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Es wird empfohlen, die Batterien täglich zu laden, oder immer dann, wenn beim Betätigen der Höhenverstellung ein Warnsignal ertönt. Der Lifter kann über Nacht am Ladegerät angeschlossen bleiben, die Batterien können nicht überladen werden.

Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@treqipment.se
www.treqipment.com

Group Subsidiaries

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT