



TR 9650

Chariot de transfert

Équipements d'hygiène
conçus pour les personnes

TR 9650 Conçu pour un maximum de flexibilité

Le TR 9650 est un chariot de transfert conçu pour adopter facilement en différentes configurations afin de s'adapter à un grand nombre de besoins des patients et résidents, dans des environnements de soins à la fois de courte et longue durée.



Enregistré à Medical Products Agency, Suède, comme produit MD Class 1, MDD 93/42EEC.

TR se réserve le droit de changer le design et/ou faire des améliorations sans préavis.




Dans une position debout, assise ou couchée, le TR 9650 apporte une solution complète et décente pour les résidents nécessitant une assistance pour entrer et sortir d'une baignoire. Un accès facile et des surfaces d'assise rembourrées assurent une expérience de bain agréable. Le TR 9650 possède des poignées et sangles ergonomiques afin d'assurer la sécurité et la tranquillité du personnel et du résident qui est baigné.

Le TR 9650 peut être converti entre un chariot de transfert d'une chaise et d'un brancard, afin que le personnel et le soignant puisse répondre efficacement aux besoins du patient en terme de toilette et levée.



TR EQUIPMENT

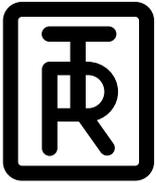


TR 9650

Chariot de transfert

Équipements d'hygiène
conçus pour les personnes

Fonctionnalités

- Une pédale de réglage de la hauteur permet au soignant de trouver la hauteur de travail la plus efficace et confortable et d'avoir les deux mains libres pour s'occuper du patient.
- Surfaces d'assise et du brancard faites d'un matériau moelleux, durable et absorbant, ce qui les rend faciles à nettoyer et entretenir et très confortables.
- Des parties latérales amovibles assurent un basculement de position simple entre chaise et brancard.
- Les poignées de sécurité dans les positions chaise et brancard peuvent être pliées pour un accès facile et remises en place lorsque le résident est en position.
- La position des pieds est conçue pour une approche facile de la chaise et du brancard.
- Le châssis bas est conçu pour un accès facile sous les lits et baignoires.
- Un frein de sécurité s'enclenche automatiquement si la chaise / le brancard heurte une surface ou un obstacle.
- Une commande d'arrêt automatique assure que le siège et brancard ne tombent pas en cas de mal fonctionnement de la courroie.
- Une connexion de chargeur de batterie magnétique pour éviter les avaries lors de la recharge.
- Tonalité de batterie faible.
- Prêt à l'emploi après déballage et livraison, complète avec chargeur et sangles de sécurité.
- TR 9650 peut être utilisé avec presque toutes les baignoires médicalisées et thérapie. Une entretoise peut être achetée (en option) afin de changer ou améliorer la position du chariot dans la baignoire.
- Les fonctionnalités supplémentaires incluent une pédale d'arrêt d'urgence, batterie rechargeables de grande capacité et de larges roulettes verrouillables.
- Surfaces d'assise rembourrées confortables et faciles d'accès assurant une expérience de bain agréable.

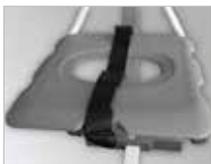

Chaise percée convertible en siège grâce à un couvercle.



Surfaces confortables et faciles d'entretien.



Châssis étroit pour des transferts faciles et sécurisés.



Dossier confortable facilement déplaçable vers chaque bras pour support du dos



Parties latérales amovibles pour conversion facile de brancard à chaise. Aucun outil requis.



Bouton d'arrêt d'urgence et connexion de chargeur de batterie magnétique pour la sécurité et facilité d'utilisation.

Exemples d'utilisation

Avec les baignoires TR, le chariot de transfert complète un système offrant un cycle de bain sécurisé, efficace, orienté vers le patient, avec une meilleure qualité de soin.




Caractéristiques techniques

Hauteur de levage	200 - 965 mm (8 - 38")
Charge maximale	150 kg (330 lbs)
Structure	Acier et acier inoxydable plaqué zinc et laqué
Roulettes	Roulettes jumelées Ø100 mm, deux avec freins et deux avec blocage directionnel
Commande	Pédale pour l'ajustement de la hauteur
Brancard, coussin	Matériau ignifuge
Batterie	Rechargeable, 24 V

Models


- Chariot de transfert chaise Art.no. 0542000 chargeur de batterie inclus
- Chariot de transfert en brancard Art. no. 0542010 chargeur de batterie inclus
- Combiift avec chaise. Art.no. 0542020 chargeur de batterie inclus
- Deux parties latérales de brancard pour chariot de transfert avec chaise, coussin inclus. Art.no. 0542030

Dimensions (mm)

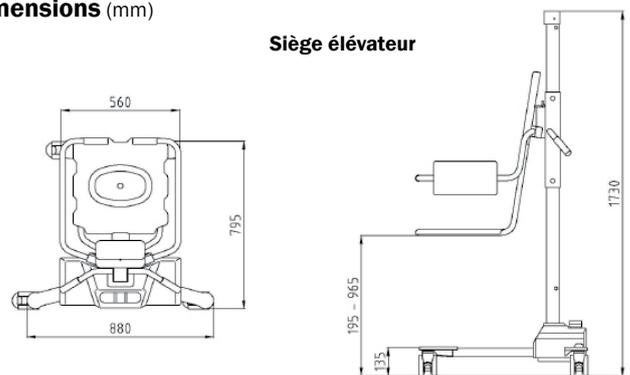

Siège élévateur

Brancard/Combi élévateur

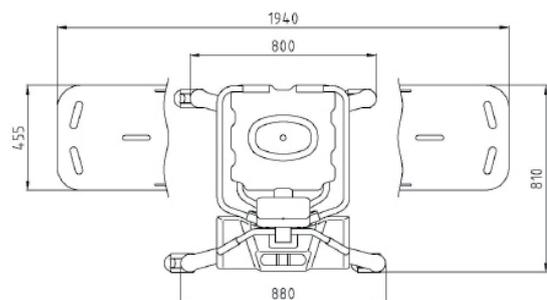

Siège social

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Filiales

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Allemagne, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT